


細菌カウンタの使用法


下記の手順に従い、細菌カウンタを使用して唾液中の口腔内細菌をはかってください

1 細菌カウンタ機器本体の準備をします

① 機器本体の「電源」ボタンを押してください

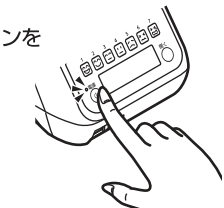

② 機器本体の「開く」ボタンを押して、フタを開けてください

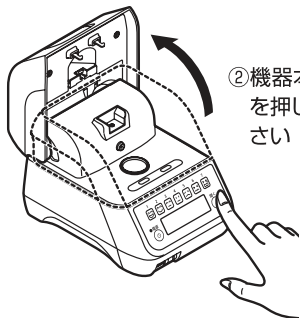

2 センサーチップを装着します


① センサーチップをケースから取り出します




② センサーチップの方向を確認して、機器本体のセンサーチップ挿入口へ挿入してください



③ 正しく装着されますと「ピー」と鳴ります。間違って挿入されますと「ピ・ピ・ピ」と鳴りますので、再度正しく挿入してください。

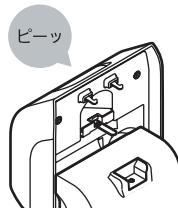

全体が白い面を上にして、橋がまっすぐなほうをセンサーチップ挿入口へ向けてください。

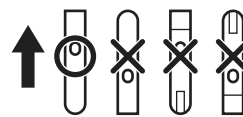


3 ディスポーザブルカップを本体機器にセットします

① ディスポーザブルカップのアルミはくをゆっくりはがしてください



② 機器本体のディスポーザブルカップ取付部にセットしてください

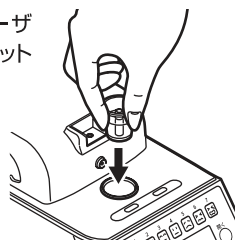

4 唾液を採取します(吐唾法)


① 唾液を一旦飲み込み、3分間唾液を溜めてください



② 途中で唾液を紙コップに入れてもよいですが、3分間溜め続けてください



③ 備え付けの専用綿棒を紙コップに溜めた唾液に漬けて、10数えてください。

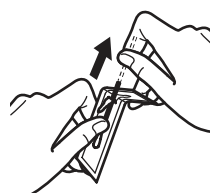

綿球部
綿棒の綿球部分が全て漬かるように



5 唾液中の細菌数を測定します


① 唾液に漬けた綿棒を取り出し、本体機器にセットされたディスポーザブルカップの中央に差し込んでください




② 機器本体のフタを閉めてください。閉めると測定を開始します



③ 約1分でフタが自動で開き、測定終了となります

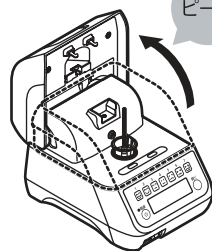


6 液晶画面で測定結果を確認します

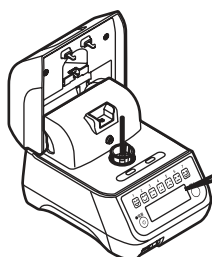

7段階のレベル表示を確認してください

(例) フェイスマーク表示部とレベル表示
レベル1 (少ない) ← レベル7 (多い)

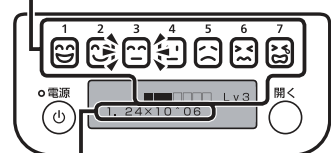

細菌の測定数値が表示されます。確認してください。

液晶画面表示部 (測定数値)
1.24 × 10 の6乗 = 124万個

7 測定を終了します

センサーチップと綿棒が入ったディスポーザブルカップを取り出して廃棄してください

