

血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体キット

イムファストチェック® HIT-IgG

- イムノクロマトでHIT抗体(IgG)を検出できるキットです
- 判定時間は15分で迅速に結果を得ることができます
- 使いやすい3テスト包装です

判定法



陰性例

コントロールラインが認められ、判定ラインが認められなかった場合。

陽性例

コントロールラインが認められ、判定ラインが認められた場合。

※判定ラインの発色にかかわらずコントロールラインが認められなかった場合は、操作が不適当であったか、テストプレート内での反応が成立しなかった等の可能性が考えられるため、新しいテストプレートを用いて再度検査を行って下さい。

製品概要

商品コード	製品番号	製品名	包装
225307	RM530-K	イムファストチェック HIT-IgG 製造販売承認番号:30400EZ00041000	テストプレート 1テスト×3 検体希釈液 2mL×3



※「イムファストチェック」はPHC株式会社の登録商標です。

- 使用目的: 血漿又は血清中の抗血小板第4因子(抗PF4)-ヘパリン複合体IgG抗体の検出
- 検体種: 血清又は血漿
- 判定時間: 15分
- 貯蔵方法: 2~8℃
- 有効期間: 製造後24ヵ月(使用期限は外箱及びアルミ袋に記載)
- 必要な器具・器材: マイクロピペット(10μLと100μLが量りとりれるもの) およびチップ、ストップウォッチ等(15分を正確に計測できるもの)
- 保険点数: D011 免疫血液学的検査
血小板第4因子-ヘパリン複合体抗体定性 420点*
*2023年5月現在
使用上の注意につきましては添付文書をご参照ください。



PHC株式会社のHPIはこちらの二次元コードからもご覧いただけます。

販売元

PHC株式会社 診断薬事業部

お問い合わせ先 TEL 03-6865-2500
URL <https://www.phchd.com/jp/ivd/>

製造販売元

株式会社 日本凍結乾燥研究所

〒204-0022 東京都清瀬市松山三丁目1番5号